

# LiNA AntiFog Solution™

Sorgt für klare Kameraoptik bei  
endoskopischen Eingriffen



# LiNA AntiFog Solution™

Die Palette der AntiFog Solutions (Antifog-Lösungen) von LiNA Medical besteht aus LiNA Elfred™, LiNA Clear Sight™ und LiNA Clear Sight Wipe™.

## Funktional. LiNA Elfred™

LiNA Elfred™ besteht aus einem kleinen Schwamm in einem Aluminiumfolienbehälter mit Klebstoff auf der Rückseite. Der Schwamm wurde vorab in 6 ml AntiFog Solution (Antifog-Lösung) getränkt. LiNA Elfred™ bietet ein hohes Maß an Komfort, da es einfach und sofort einsatzbereit ist:

- 1) Entfernen Sie den Klebestreifen unter dem Behälter und befestigen Sie ihn am Patientenabdecktuch oder dem Instrumententisch.
- 2) Entfernen Sie den Deckel des Behälters.
- 3) Drücken Sie das Endoskop auf den Schwamm und drehen Sie es, um eine Membran der AntiFog Solution (Antifog-Lösung) aufzutragen.
- 4) Bei Bedarf kann der Schwamm aus dem Behälter entnommen werden, um die Seiten des Endoskops zu reinigen.

LiNA Elfred™ ist mit oder ohne Alkohol erhältlich.

## LiNA Clear Sight™

LiNA Clear Sight™ besteht aus einer 6 ml-Flasche und einem Schwamm mit Klebstoff auf der Rückseite. LiNA Clear Sight™ ist einfach zu verwenden:

- 1) Befestigen Sie den Schwamm am Patientenabdecktuch oder dem Instrumententisch.
- 2) Öffnen Sie die Flasche und gießen Sie die Lösung auf den Schwamm.
- 3) Drücken Sie das Endoskop auf den Schwamm und drehen Sie es, um eine Membran der AntiFog Solution (Antifog-Lösung) aufzutragen.

LiNA ClearSight™ ist mit oder ohne Alkohol erhältlich.

## LiNA Clear Sight Wipe™

LiNA Clear Sight Wipe™ ist mit AntiFog Solution (Antifog-Lösung) getränkt und einzeln in einem Peelbeutel verpackt. LiNA Clear Sight Wipe™ ist nur ohne Alkohol erhältlich.



### Bestellinformationen:

LiNA AntiFog Solution™ **CE 0459**

Produktcode	Beschreibung	UOM
CS-20	<b>LiNA Elfred™</b> – 6 ml AntiFog Solution (Antifog-Lösung) für die Endoskopoptik. Steril, Einwegprodukt.	30er-Packung
CS-20A	<b>LiNA Elfred™</b> – 6 ml AntiFog Solution (Antifog-Lösung) für die Endoskopoptik mit 4 % Alkohol. Steril, Einwegprodukt.	30er-Packung
CS-30	<b>LiNA Clear Sight™</b> – 6 ml AntiFog Solution (Antifog-Lösung) für die Endoskopoptik. Steril, Einwegprodukt.	20er-Packung
CS-30A	<b>LiNA Clear Sight™</b> – 6 ml AntiFog Solution (Antifog-Lösung) für die Endoskopoptik mit 4 % Alkohol. Steril, Einwegprodukt.	20er-Packung
CS-40	<b>LiNA Clear Sight Wipe™</b> – Steriles Tuch mit AntiFog Solution (Antifog-Lösung) für die Endoskopoptik. Einwegprodukt.	30er-Packung

©2021 LiNA Medical ApS. Alle Rechte vorbehalten.  
LiNA ist ein in der EU, den USA und China eingetragenes Warenzeichen von LiNA Medical.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Dänemark

• Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com  
CVR: 10054974

Qualitätsmanagementsystem  
EN ISO13485:2016

